

snapon
smile®

FAQ

Questions/Réponses
Fréquentes

 TBR® | Unique, comme votre sourire



Questions / Réponses Fréquentes



Qu'est ce qu'un Snap-On Smile® ?

Snap-On Smile est un appareil de restauration amovible esthétique breveté à multi-usage qui ne nécessite aucune préparation, pas de modification de la structure de la dent, pas d'injections, et aucun adhésif.

Il se clipse directement sur les dents existantes et peut être appliqué à plusieurs situations.

Il est fabriqué dans une résine acétal cristallisée qui permet à l'appareil d'être ultra-fin (0.5mm) sans compromettre sa résistance.

Ce matériau est très résistant et a une légère flexibilité. Son élasticité permet à l'appareil de gagner en rétention par «flexion» sur les hauteurs et les contours des dents existantes.

Questions / Réponses Fréquentes

Comment fonctionne le système de rétention Snap-On Smile® ?

La rétention des appareils Snap-On Smile® est faite sur les dents d'origine ne nécessitant pas de crochets, pas de couverture palatine et pas d'adhésif.

Questions / Réponses Fréquentes

Pour quel type de patient dois-je proposer Snap-On Smile® ?

Le Snap-On Smile trouve une application dans de multiples cas cliniques :

- Restaurations provisoires post et pre-implantaire
- Les dents tâchées,
- Les dents mal alignées,
- Les pertes de la structure des dents,
- Restaurations cosmétiques
- Exposition excessive des gencives
- Diastèmes
- Dentition irrégulière

Existe t-il différentes teintes comme pour les couronnes et les prothèses ?

Votre patient et vous pouvez choisir parmi 19 teintes, en vous aidant de votre guide de teinte.

Vous pouvez ainsi personnaliser le Snap-On Smile au sourire de vos patients.

Questions / Réponses Fréquentes



Comment commander Snap-On Smile®?

3 étapes !

1 – Contactez-nous directement au 05 62 16 71 04 ou contactez votre conseiller commercial pour recevoir votre bon de commande ou encore téléchargez le sur notre site internet.

2 - Pour chacun de vos cas Snap-On Smile, complétez votre Bon de commande accompagné des éléments nécessaires (ex. empreintes, etc.) et retournez l'ensemble à : [TBR IMPLANTS GROUP \(Service Snap-On-Smile\) - 24, impasse René Couzinet 31 500 Toulouse](#)

3- Recevez votre Snap-On Smile. Redonnez enfin le sourire à vos patients !

Questions / Réponses Fréquentes



Quel est le délai de traitement de ma commande Snap-On Smile?

3 semaines sont nécessaires à la fabrication de votre Snap-On Smile.

Les patients peuvent-ils manger et boire ce qu'ils veulent ?

Les patients ne sont pas limités et peuvent avoir n'importe quelle activité sans restriction: manger, boire, etc.

Questions / Réponses Fréquentes



Combien de temps dure Snap-On Smile en bouche ?

La durée conseillée pour le Snap-On- Smile est de 1 à 3 ans.

Questions / Réponses Fréquentes

Que dois-je conseiller à mes patients pour nettoyer leur Snap-On Smile ?

Les patients ont besoin d'enlever et de nettoyer leur Snap-On Smile® après les repas et avant de dormir.

Pour obtenir de meilleurs résultats vos patients peuvent utiliser l'appareil de désinfection Snap-On Smile® accompagné d'une solution de nettoyage et du gel anti-bactérien. Les patients peuvent également nettoyer à l'aide d'une brosse à dents souple. Les patients doivent toujours maintenir une bonne hygiène buccale normale de leur dentition naturelle.

Questions / Réponses Fréquentes



Le Snap-On Smile est-il encombrant une fois en bouche ?

Comme lors de toute restauration réalisée à l'aide de facettes dentaires, le port du Snap-On Smile nécessite un temps d'adaptation.

L'occlusion peut-elle changer au cours du temps ?

Les trous occlusaux placés sur la partie postérieure de la prémolaire maintiennent parfaitement l'occlusion du patient.

Quelle est l'épaisseur du Snap-On Smile ?

La finesse maximale est de 0,5 mm.
Selon le cas, l'épaisseur est adaptée afin d'assurer le meilleur résultat esthétique.



Unique, comme votre sourire

MERCI