



PeriOptix®

Loupes & Lumières

Incroyablement légères.


Une loupe de cette qualité
n'a jamais été aussi légère et
abordable !

 **TBR®**

Unique, comme votre sourire

Les loupes PeriOptix®


Confort Remarquable. Qualité Exceptionnelle.
Incroyablement légères.

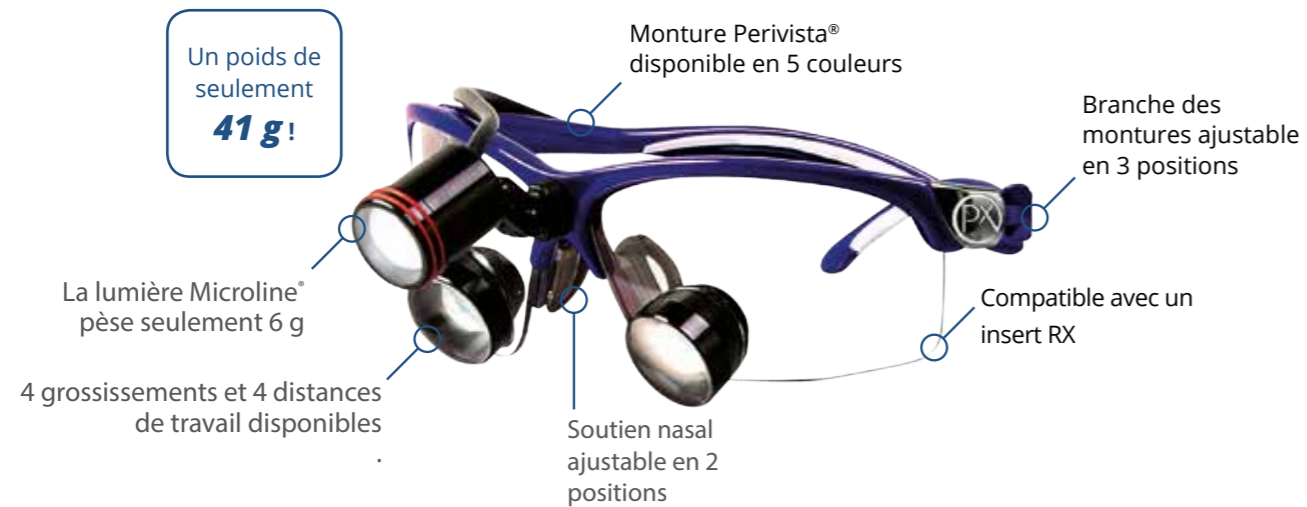

Une loupe de cette qualité n'a jamais été aussi légère et abordable !

Avec un poids de seulement 41 g, la loupe élégante et ergonomique PeriOptix MicroLine™ TTL associée à la lumière MicroLine Mini LED offre une alternative légère et compacte aux loupes lourdes et encombrantes. Expérimentez un confort de travail quotidien avec une loupe qui vous est adaptée.

Comparatif du poids des systèmes optiques

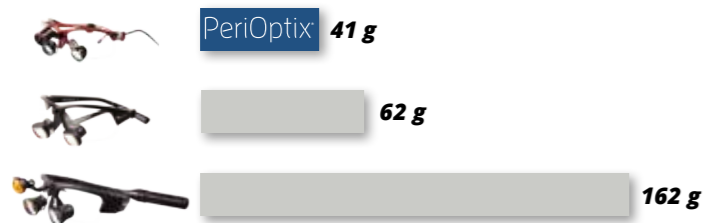

Loupe PeriOptix MicroLine TTL Monture

- Une des plus compacte et légère du marché
- Disponible en différents grossissements
- 4 distances de travail
- 5 couleurs de monture Sport Perivista

Lumière PeriOptix MicroLine Mini LED

- LED portable très lumineuse (40 000 lux)
- Batterie Li-Ion de 8h d'autonomie
- Poids de 6 grammes
- Câble remplaçable par l'utilisateur

L'alliance du style et du confort


Une posture correcte, une fatigue réduite

Non seulement la légèreté de ces loupes a réduit ma fatigue, mais en plus mes mesures personnalisées m'ont apportées un réelle ergonomie de travail. **J'adore mes PeriOptix !**

Annette Stelter
Institut dentaire Newport Beach, CA

Plus de 60% des dentistes souffrent de douleur au dos et au cou, et plus de 90 % souffrent de fatigue oculaire.

Les loupes & lumières PeriOptix assurent une bonne posture, réduisent la fatigue et améliorent la vision.

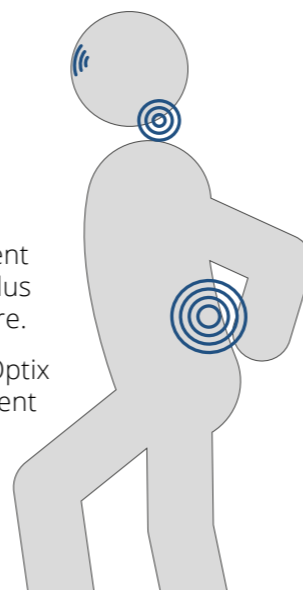

Les lumières PeriOptix®

Voir Clairement Avec ou Sans Fil.
Incroyablement efficaces.

Super pouvoir ... Sans fil.

Lumière LED Firefly™

- Un pod lumière pèse moins de 28 grammes
- Intensité lumineuse ajustable (20 kLux à 32 kLux)
- Autonomie de 90 min (intensité max) à plus de 150 min (intensité min)
- Recharge des 2 pods lumières en 2 heures
- Disponible en 3 coloris : noir, bleu ou rouge



Le kit lumière Firefly™ comprend :

- 2 pods lumière / batterie
- 1 système de fixation magnétique
- 1 station de recharge des pods
- 1 boîte de rangement résistante aux chocs
- 2 filtres composite



La lumière LED la plus légère.

Lumière LED MicroLine™ Mini

- Poids : 6 grammes
- LED portable très lumineuse (40 000 Lux)
- Batterie Li-Ion de 8h d'autonomie
- Fixation sur toutes les loupes PeriOptix ou au bandeau Freedom™
- Recharge de 90% en seulement 90 minutes
- Câble remplaçable par l'utilisateur
- Filtre composite disponible en option



Lumière MicroLine™ Mini sur loupes MicroLine™ TTL



Les loupes TTL Premium les plus légères du marché.

Loupes Through-The-Lens* (TTL)

*Loupes fixées à travers les verres de monture.

LOUPES
TTL



Loupes MicroLine™ x2.3 :
l'option la plus légère du marché.

- Seulement 35 grammes
- Optiques aux dimensions réduites
- Adaptable à vos mesures



33%
plus
petite !

Poids : **35 g**
Champ de vision : **8.9 cm**
Profondeur de champ : **11.4 cm**

Dimension
d'une optique
classique



Loupes TTL x2.7 :
le parfait équilibre pour
l'omnipraticien.

- 7 distances pupillaires standards
- Clarté et profondeur de champ optimales



Poids : **43 g**
Champ de vision : **8.9 cm**
Profondeur de champ : **10.1 cm**



Loupes TTL x3.1 :
la seconde paire idéale
pour les travaux précis.

- Idéal pour les praticiens expérimentés
- Grossissement le plus élevé (Galiléen)



Poids : **47 g**
Champ de vision : **6.4 cm**
Profondeur de champ : **7.6 cm**



Loupes TTL x4.0 :
la vision XXL sans
compromettre la clarté.

- Miniaturisation de l'oculaire avec un poids plume
- Image claire et nette sur l'ensemble du champ de vision
- Angle de déclinaison supérieur pour un confort maximal et une fatigue réduite




PRISMATIC 4X

Poids : **61 g**
Champ de vision : **6.4 cm**
Profondeur de champ : **6.4 cm**

Loupe Galiléenne

■ Le système Galiléen est composé d'un objectif (lentille convergente) et d'un oculaire (lentille divergente) permettant de redresser l'image.

- Légèreté
- Bonne profondeur de champ
- Bon champ de vision

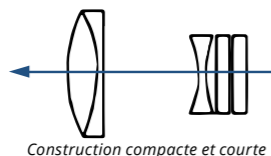


Construction compacte et courte

Loupe Prismatique

■ Le système Prismatique adjoint un diaphragme, des prismes internes et un oculaire convergent permettant d'avoir un grossissement supérieur.

- Image nette
- Plus fort grossissement

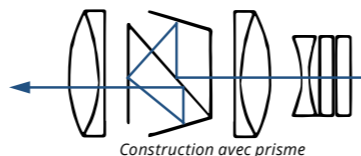

Construction avec prisme

Extrême légèreté et clarté exceptionnelle.

Loupes Flip-Up MicroLine™

- 2 grossissements disponibles : x2.3 et x2.7
- Complètement ajustable
- Optiques flip-up les plus légères
- Champ de vision large
- Technologie Optilock et verrouillage double point brevetés



Loupes MicroLine™ x2.3
sur monture Perivista®

Nos loupes flip-up les mieux notées

Loupes Flip-Up Panoramic™

- 3 grossissements disponibles : x2.5, 3.0 et x3.5
- Nouveau design épuré
- Lentilles à champ large panoramique
- Optiques waterproof
- Technologie Optilock et verrouillage double point brevetés



Loupes Panoramic™ x2.5
sur monture Perivista®

Des modèles de qualité à prix réduit

Loupes Flip-Up Legacy™ Sport

- 3 grossissements disponibles : x2.5, 3.0 et x3.5
- Meilleur rapport qualité / prix
- Technologie Optilock et verrouillage double point brevetés



Loupes Legacy™ x2.5
sur monture Sport Mirage™

Insert conçu pour la dentisterie au laser

Filter vert pour monture Perivista

- Compatible laser diode NvPro3 - Longueur d'onde 810 nm
- Fixation sur la partie interne de vos loupes
- Protection et sécurité




Insert laser
sur monture
Perivista®

Vos loupes PeriOptix en 5 étapes !



1 Adapter votre grossissement pour tous vos travaux

Exemple d'une empreinte SplashMax.

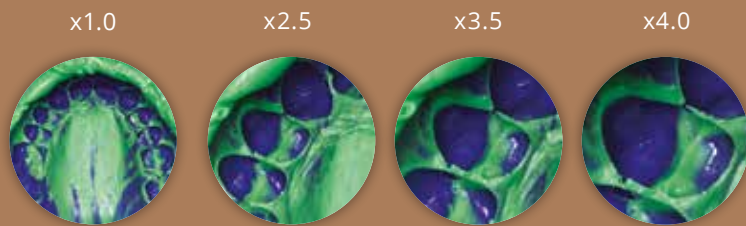

Champ de vision réduit

Champ de vision Large

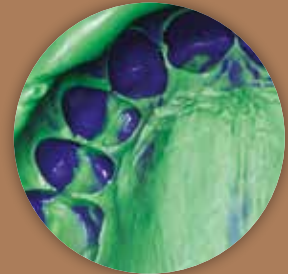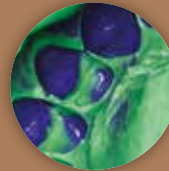


Un plus grand grossissement implique un champ de vision plus réduit.

2 Mesure de votre Distance Pupillaire

La Distance Pupillaire (DP) est la mesure, en millimètres, de la distance séparant le centre des pupilles de chaque œil. Cette mesure peut être réalisée rapidement et sans douleur par votre consultant agréé PeriOptix ou par un opticien. NB : si la mesure est réalisée par un opticien, assurez-vous qu'elle soit prise à l'infini.

Tableau de mesure pupillaire PeriOptix


DP Droite	DP Totale	DP Gauche

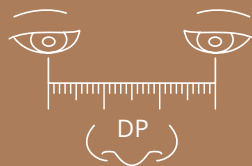

3 Mesure de votre Distance de Travail

La distance de Travail (DT) est la mesure, en centimètres, de la distance pour laquelle le praticien travaille confortablement. Cette distance doit être mesurée alors que le praticien est dans une position verticale assurant ainsi une parfaite ergonomie.

- S 30 - 40 cm*
- R 35 - 45 cm*
- L 40 - 50 cm*
- XL 45 - 55 cm*

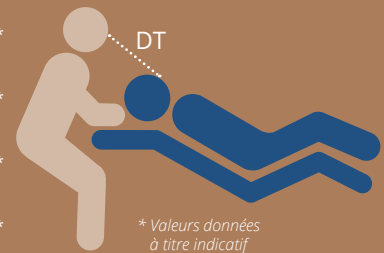

* Valeurs données à titre indicatif


4 Mesure de la Hauteur de Segment

La hauteur du segment est la mesure verticale correspondante à la hauteur entre le bas de la monture et le segment croisant le bas de la pupille. Cette mesure permettra d'orienter au mieux la position des optiques transfixés sur les verres de vos loupes.

Tableau de mesure Hauteur de segment

- 1
- 2
- 3
- 4

5 Choix du coloris de votre monture

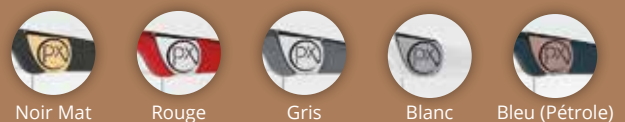

Noir Mat

Rouge

Gris

Blanc

Bleu (Pétrole)



Nos consultants sont certifiés pour la mesure optique. Après avoir pris vos mesures, ils vous proposeront la loupe parfaitement adaptée à vos besoins.

Engagement Qualité

PeriOptix est engagé à suivre les normes de qualité des produits et satisfaction du client. Notre système qualité est conforme à toutes les exigences américaines et européennes et répond aux exigences applicables de la directive 93/42 / CEE nécessaire à l'obtention du marque CE de conformité sur nos produits.

Les loupes & lumières PeriOptix sont fabriquées par :

dm
DenMat
DENMAT HOLDINGS LLC.
1017 W. Central Ave. Lompoc,
California 93436 USA
www.denmat.com

Les loupes & lumières PeriOptix sont disponibles en exclusivité chez :

TBR
TBR DENTAL GROUP
24, impasse René Couzinet - 31500 Toulouse
05 62 16 71 00 contact@tbr.dental
www.tbr.dental

Les produits cités dans ce document sont des dispositifs médicaux destinés à la réhabilitation esthétique ou fonctionnelle du sourire, par des professionnels de santé habilités. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant sur les notices des produits. Toutes les informations indispensables pour un bon usage de ces dispositifs sont disponibles auprès de SUDIMPLANT SAS (Groupe TBR).